

SPEICHELTEST

ABLAUFBESCHREIBUNG

GenoLine



1. Handschuhe anziehen, um mögliche Kontaminationen zu vermeiden.




2. Metallhülse aufschrauben und Glasröhrchen entnehmen.




3. Transmitterstäbchen (Wattestäbchen) zur Hand nehmen und die Verpackung vorsichtig entfernen.



4. Transmitterstäbchen an der Unterseite entnehmen.

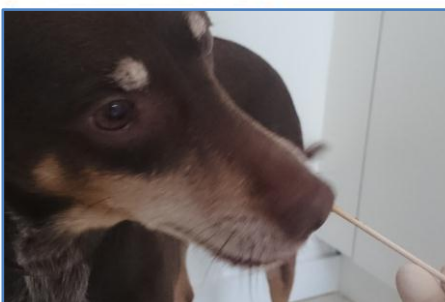

5. Dem Hund den Mund öffnen und das wattierte Ende des Transmitterstäbchens in die Mundhöhle einführen.

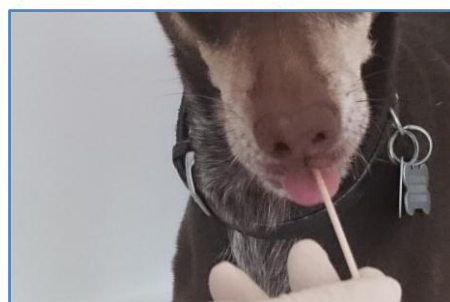

6. Das Transmitterstäbchen hin und her bewegen, auch an den Innenseiten der Wangen. So wird sichergestellt, dass genügend Speichel aufgenommen wird.



7. Wenn dies der Fall ist, das Stäbchen knapp oberhalb des Wattebezugs abbrechen.



8. Das nun kurze Transmitterstäbchen mit der wattierten Spitze zuerst in das Glasröhrchen einschieben.




9. Mit dem zugehörigen Stopfen verschließen. Namensaufkleber beschriften und aufkleben. So ist eine Verwechslung ausgeschlossen.



10. Das verschlossene Glasröhrchen in die Metallhülse stecken und wieder verschließen.



12. Das nach Angaben der Kundin ausgefüllte Datenblatt nun zusammenlegen und gemeinsam mit dem befüllten Metallschutz in den frankierten Rückumschlag einschieben. Umschlag verschließen und an uns abschicken!

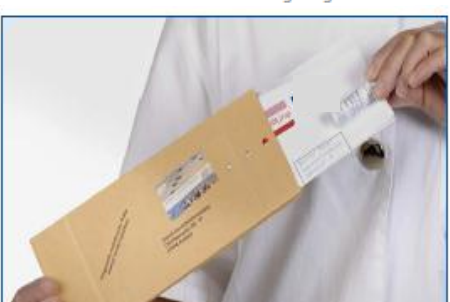

Metallschutz in den frankierten Rückumschlag einschieben. Umschlag verschließen und an uns abschicken!